

Contour[®]
plus ONE[»]
优安进[®][»]

首次使用
优安进血糖仪
测试您的血糖



Contour.
plus ONE[®]
优安进[®]

优安进血糖仪提供高准确度的
血糖结果



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

初始设定**优安进**血糖仪



Contour[®]
plus **ONE**[™]
优安进[®]

初始设定

在测试之前，血糖仪需要一个简单的初始设定。通过3个简单的步骤解锁。

按住“OK”按钮并保持2秒钟，直到血糖仪开启




Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

初始设定

在测试之前，血糖仪需要一个简单的初始设定。通过3个简单的步骤解锁。

按住“OK”按钮并保持2秒钟，直到血糖仪开启

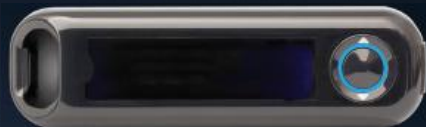

Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

初始设定

在测试之前，血糖仪需要一个简单的初始设定。通过3个简单的步骤解锁。

按住“OK”按钮并保持2秒钟，直到血糖仪开启



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 初始设定

确认或调校血糖仪上的时间

更改小时，按下▲或▼按钮



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 初始设定

设定小时并移到设定分钟，按下
“OK” 按钮



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 初始设定

更改分钟，按下 ▲ 或 ▼ 按钮



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

1. 初始设定

按下“OK”按钮完成设定



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 初始设定

确认或调校血糖仪上的日期

更改年份，按下 ▲ 或 ▼ 按钮



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 初始设定

按下“OK”按钮，完成设定



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

2. 初始设定

更改月份，按下▲或▼按钮



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

2. 初始设定

按下“OK”按钮，完成设定



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

2. 初始设定

更改日期，按下 ▲ 或 ▼ 按钮



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 初始设定

按下“OK”按钮，完成设定




Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 初始设定

血糖仪会简要显示您已存储的设置，然后发出信号声并自动关闭。

血糖仪设定完成。

您现在可以测试您的血糖。

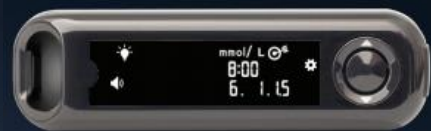

Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

使用**优安进**血糖仪测试您的血
糖值



Contour[®]
plus **ONE**)
优安进)[®]

1. 插入试纸

拿着试纸，灰色方形末端朝上面向血糖仪。

将灰色方形末端稳稳的插入试纸接口，直到血糖仪发出信号声。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 插入试纸

拿着试纸，灰色方形末端朝上面向血糖仪。

将灰色方形末端稳稳的插入试纸接口，直到血糖仪发出信号声。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 测量您的血糖

当血糖仪已经准备好进行测量血滴，试纸图标会闪烁。

请立即用试纸尖端去触碰血滴。

血液会经过尖端被吸到试纸内。

把有血滴的试纸置稳，直到血糖仪发出信号声。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 结果

倒数5秒后，血糖仪会显示您的血糖测量结果。

如果有使用用餐标志功能，空腹、餐前、餐后或没有标记的标志会在血糖结果屏幕上闪烁。




Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 结果

倒数5秒后，血糖仪会显示您的血糖测量结果。

如果有使用用餐标志功能，空腹、餐前、餐后或没有标记的标志会在血糖结果屏幕上闪烁。

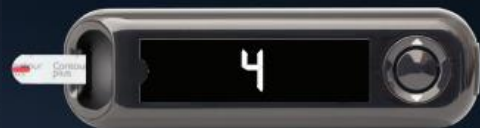


Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 结果

倒数5秒后，血糖仪会显示您的血糖测量结果。

如果有使用用餐标志功能，空腹、餐前、餐后或没有标记的标志会在血糖结果屏幕上闪烁。

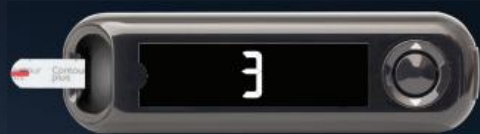

Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 结果

倒数5秒后，血糖仪会显示您的血糖测量结果。

如果有使用用餐标志功能，空腹、餐前、餐后或没有标记的标志会在血糖结果屏幕上闪烁。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 结果

倒数5秒后，血糖仪会显示您的血糖测量结果。

如果有使用用餐标志功能，空腹、餐前、餐后或没有标记的标志会在血糖结果屏幕上闪烁。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 结果

倒数5秒后，血糖仪会显示您的血糖测量结果。

如果有使用用餐标志功能，空腹、餐前、餐后或没有标记的标志会在血糖结果屏幕上闪烁。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

4. 结果

血糖仪会根据一天的时间和进餐时间（空腹/早餐、午餐、晚餐或午夜）来建议用餐标记。

使用▲或▼按钮选取合适的用餐标记，按下“OK”按钮

您可以在您的血糖仪或**臻爱管家小程序**中选取用餐标记作为您的血糖读数



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

4. 结果

血糖仪会根据一天的时间和进餐时间（空腹/早餐、午餐、晚餐或午夜）来建议用餐标记。

使用▲或▼按钮选取合适的用餐标记，按下“OK”按钮

您可以在您的血糖仪或**臻爱管家小程序**中选取用餐标记作为您的血糖读数



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

5. 结果

如果您的血糖测试完成后，血糖仪会显示您的结果，包括单位、时间、日期、用餐标记（如选取）和目标提示。

SmartLIGHT™功能，绿色处于目标血糖水平，红色低于目标血糖水平，黄色高于目标血糖水平。



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

6. 结果

臻爱管家小程序会在您的移动设备上显示最新的血糖测试结果。

信息有助于管理您的糖尿病。



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

如果您对**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®智能血糖仪和臻爱管家小程序应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员，并参阅产品使用指南，如欲了解更多资讯或查询您的国家是否有**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®血糖仪，请浏览 www.ascensiachina.com



请变更目标范围，饮食和运动前先咨询您的医疗保健专业人员
获取臻爱管家小程序，用微信扫描 臻爱管家 小程序码或者二维码进入



微信扫一扫，使用小程序



Contour.
plus ONE[®]
优安进[®]

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志及Contour均为健臻(Ascensia Diabetes Care Holdings AG)的商标和及/或注册商标。

©版权所有 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

WWW.ASCENSIACHINA.COM

