

Contour[®]
plus ONE[»]
优安进[®]

使用
优安进血糖仪
设置监测提醒功能



Contour[®]
plus **ONE**[®]
优安进[®]

血糖监测提醒可帮助您把血糖水平掌握的更好，为您提供全面的血糖读数



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 血糖监测提醒


您可以点击页面底部菜单栏**血糖管家**进入到血糖管家页面，从功能列表中点击**我的提醒**进入提醒功能



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 血糖监测提醒


进入我的提醒功能后，首先看到的是以往的提醒记录，您可以在提醒记录中浏览您设置好的提醒

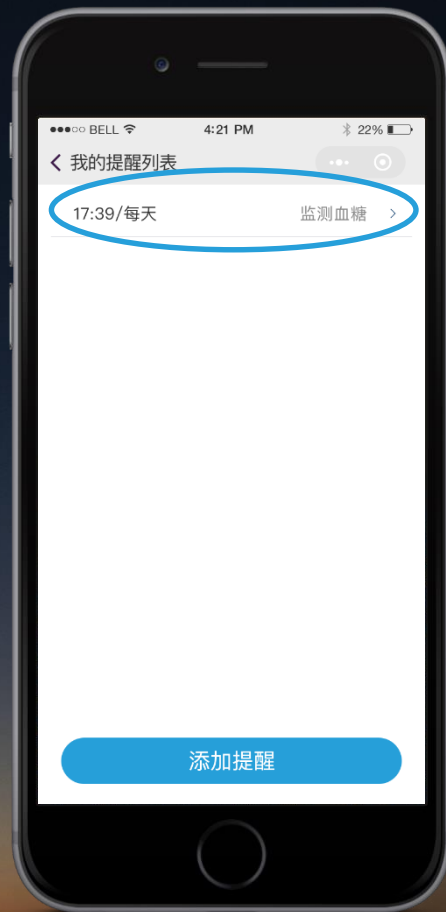

Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 血糖监测提醒

点击**添加提醒**，开始添加您的提醒记录

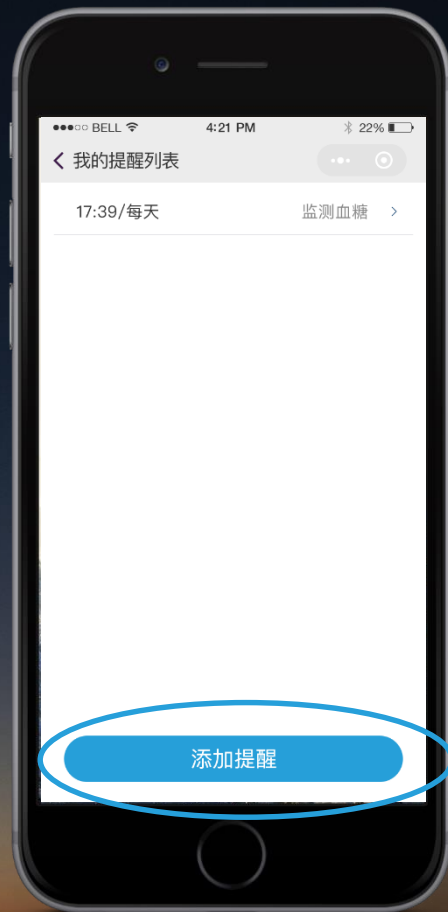

Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

4. 血糖监测提醒

设置您要提醒的类别，例如：血糖监测、用药、其他



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

5. 血糖监测提醒

设置您要提醒的周期，系统会通过
公众号消息对您进行消息提醒



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

6. 血糖监测提醒

设置您要提醒的时间，系统会通过
公众号消息对您进行消息提醒



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

7. 血糖监测提醒

点击**保存**按钮，您的提醒记录已启用



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

如果您对**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®智能血糖仪和臻爱管家小程序应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员，并参阅产品使用指南，如欲了解更多资讯或查询您的国家是否有**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®血糖仪，请浏览 www.ascensiachina.com



请变更目标范围，饮食和运动前先咨询您的医疗保健专业人员
获取臻爱管家小程序，用微信扫描 臻爱管家 小程序码或者二维码进入



Contour.
plus ONE)
优安进®)

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志及Contour均为健臻(Ascensia Diabetes Care Holdings AG)的商标和及/或注册商标。

©版权所有 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

WWW.ASCENSIACHINA.COM

